


MC-01-013 | MIRUS Draining Kit

Step-by-step instruction MIRUS Controller Draining / Schritt-für-Schritt-Anleitung
MIRUS Controller Entleerung / Instructions détaillées étape par étape évacuer
MIRUS Controller / Passo-passo le istruzioni Lo svuotamento MIRUS Controller /
Instrucciones paso a paso para el Drenaje del MIRUS Controller /
Krok po kroku - Instrukcja opróżniania zbiornika na anestetyk w MIRUS Controller

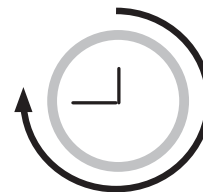

en

Warning: Device must cool down completely before procedure can be performed. Minimum 45 minutes.

de

Warnung: Vor dem Entleeren muss das Gerät vollständig abkühlen. Mind. 45 Minuten.

fr

Avertissement: Laisser refroidir complètement avant de vider le dispositif. 45 minutes du moins.

it

Avvertenza: Prima di scaricare deve raffreddare completamente. Come minimo 45 minuti.

es

Advertencia: El dispositivo debe enfriarse por completo antes de realizar el procedimiento. Mínimo 45 minutos.

pl

Ostrzeżenie: Urządzenie musi całkowicie ostygnąć przed rozpoczęciem procedury opróżniania. Minimalny czas od odłączenia zasilania, to 45 minut.



Technologie Institut Medizin
GmbH (TIM)
August-Thyssen-Straße 30
D-56070 Koblenz
Germany
T.: +49 (0) 261 899 689 00
F.: +49 (0) 261 899 689 09
info@tim-gmbh.de
www.tim-gmbh.de

Note: Replace the o-ring of the screw plug after each drain. / **Hinweis:** Den O-Ring der Verschlusschraube nach jedem Entleeren austauschen. /

Remarque : Remplacez le joint torique du bouchon fileté après vidange. / **Nota:** Sostituire l'O-ring del tappo a vite dopo ogni scarico. /

Nota: Reemplace la junta tórica del tapón roscado después de cada drenaje. / **Uwaga:** Po każdym odpływie należy wymienić o-ring zaśleпки gwintowanej.

MC-01-013 | MIRUS Draining Kit



Art.No. MC-01-013 | MIRUS Draining Kit Step-by-Step F.00

